

Wichtige Merkmale zum Versand der Proben

- 1. Kühlelemente am Vortag in den Tiefkühler legen.**
- 2. Proben anmelden, sofern das Aufgebot nicht von der LaBeCo GmbH kommt.**
- 3. Probenrapport (beide Seiten) korrekt und vollständig ausfüllen.**
- 4. Die Probenröhrchen in das mitgelieferte Gestell stellen. Bitte keine leeren Probenröhrchen zurücksenden. Wir werden Ihnen die gleiche Anzahl Röhrchen zurückschicken, wie Sie uns geschickt haben.**
- 5. Darauf achten, dass das Probengut in der Box nicht herumfliegt.**
- 6. Kühlelemente in die Box legen.**
- 7. Alte Adressetikette auf dem Deckel entfernen und die Zustelladressetikette, versehen mit dem Absender, aufkleben.**

Bitte Dispobox sauber halten!

Besten Dank
Ihr LaBeCo Team